

TOM® Plashulp


INSTRUCTIEKAART

toilet
OP MAAT



1

Plaats de plashulp tegen uw onderlichaam en druk deze licht aan.

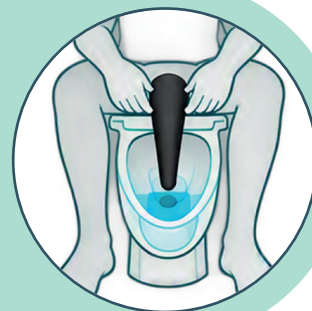

2

Klem de plashulp tussen uw benen.

Lukt dit niet? Houd de plashulp dan vast aan de bovenzijde.



3

Zorg ervoor dat de onderzijde van de plashulp goed in de toiletpot hangt.

De urine gaat via de plashulp rechtstreeks het toilet in.



Schoonmaken



Spoel de plashulp na gebruik af met **water**.



Reinig de plashulp met een **mild schoonmaakmiddel**.



Let op!



Gebruik **geen** agressieve schoonmaakmiddelen.



Niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser.